

## RxOnly



I den här guiden finns anvisningar för förstagångsinställningar för epoc® Reader. Fullständig bruksanvisning finns i systemmanualen för epoc.

### Förpackningens innehåll

- epoc Reader
- Nätadapter för strömförsörjning
- Etikettark
- Ark med genomskinliga etiketter

### epoc Reader – beståndsdelar

I figuren nedan visas Reader-enhetens huvudsakliga beståndsdelar och dess statusindikatorlampor.




*Obs! Se om det finns uppdateringar i Siemens Healthineers Document Library (Dokumentbibliotek) innan du använder den här enheten.*

## Steg 1: Ladda

Innan du använder epoc Reader laddar du batteriet så här:

1. Kontrollera att Reader är AV. Om strömbrytarindikatorn är grön trycker du på strömbrytarknappen och håller den nedtryckt under minst tre sekunder för att stänga av Reader-enheten.
2. Anslut nätströmsadaptern till ett vägguttag.
3. Anslut nätströmsadaptern till eluttaget på baksidan av Reader-enheten.
  - Den gula batteristatusindikatorn börjar blinka.
  - När batteriet är fulladdat slutar den gula batteristatusindikatorn blinka.

Obs! Den första laddningen tar ungefär fyra timmar.

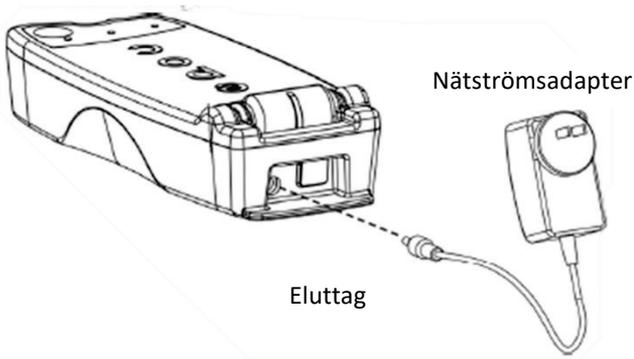

## Steg 2: Etikertera

Sätt en etikett på din epoc Reader så att du lätt kan skilja den från andra Reader-enheter på din avdelning. Använd de medföljande etiketterna och placera den genomskinliga etiketten över etiketten för ökad hållbarhet.

Obs! Ta reda på din avdelnings lokala kvalitetskontrollrutiner och gällande regler innan du börjar använda enheten.

## Hantering och underhåll

Se avsnitt 10 i användarhandboken för epoc System för information om hantering och underhåll, inklusive rekommenderade rengöringsmetoder.

Obs! Kontakta din servicerepresentant om du är osäker på kompatibiliteten för ett visst rengörings- eller dekontamineringsmedel.

## Revisionshistorik

Rev.: 07	Uppdaterade rubrik och revision, lade till avsnittet "Hantering och underhåll"
Rev.: 06	Uppdaterade kontaktuppgifter och revision, ersatte symboler, mindre administrativa ändringar



**Epocal Inc.**  
2060 Walkley Rd.  
Ottawa, ON K1G 3P5 Kanada  
[siemens-healthineers.com/epoc](https://www.siemens-healthineers.com/epoc)



**Siemens Healthcare  
Diagnostics Manufacturing Ltd.**  
Chapel Lane  
Swords, Co. Dublin, Irland  
[siemens-healthineers.com/poc](https://www.siemens-healthineers.com/poc)



© 2024 Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. Med ensamrätt.  
epoc och alla tillhörande märken är varumärken som tillhör Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
eller dess dotterbolag.

51000848-SV Rev.: 07 2024-04