

Lotnummer: _____ Utgångsdatum: _____

[illegible]

Lotnummer: _____ Utgångsdatum: _____

[illegible]

Lotnummer: _____ Utgångsdatum: _____

[illegible]

Instruktion för analys av kontroll:

epoc Host2:

- Låt kontroll anta rumstemperatur (1-2 timmar före analys)
- Förbered all materiel; tom engångsspruta (gärna 1mL) och tussar
- Analysera som patienttest alternativt Logga in med användare som inlagd med behörighet att analysera QA-test. Markera och håll nere pennan på readern och välj Kör QA-test, alternativ
- Skanna lotnr (QR-kod) på ampullen eller förpackningen
- Vänta tills kortet är kalibrerat innan du öppnar ampullen!
- Håll ampullen mellan tumme och pekfinger och skaka kraftigt (15 sekunder)
- Snurra/knäpp till ampullen för att få ner vätskan från toppen
- Bryt ampullen och sug upp med sprutan (helst utan nål), behöver inte ta bort luften mellan sprutkolv och kontrollvätska.
- Applicera sprutan direkt till testkortet och injicera
- Kontrollera värdena mot aktuellt kontrollblad
(hämtas från Siemens Document Library, alt tillhandahålls av lokal kontaktperson på Timik)