



Förberedelser inför analys

AFINION™ CRP Testkassett

- Testkitet kan förvaras i kylskåp (2–8 °C) fram till utgångsdatum eller i rumstemperatur (15–25 °C) i högst 4 veckor.
- Testkassetten måste uppnå en temperatur på 15–30 °C före användning. Låt den öppnade foliepåsen ligga på bänken i minst 15 minuter.
- Använd testkassetten inom 10 minuter efter att foliepåsen öppnats.
- Håll testkassetten i handtaget.

Patientprov

- Använd kapillärprov direkt från ett finger, venöst helblod (med EDTA eller heparin), serum eller plasma.
- Venöst helblod ska analyseras inom 3 dygn. Serum och plasma kan förvaras i kylskåp (2–8 °C) i 10 dygn. Kapillärprover måste användas omedelbart.
- Blanda provmaterialet genom att vända på röret 8–10 gånger före användningen.

AFINION™ CRP Control

- Kontroller ska förvaras i kylskåp (2–8 °C). Kontroller i öppnade förpackningar är stabila i 4 veckor.
- Kontrollerna kan användas kylskåpskalla.
- Blanda kontrollen genom att vända på ampullen 8–10 gånger före användningen.
- Det uppmätta värdet ska ligga inom de godkända gränser som anges i bruksanvisningen till Afinion CRP Control.

AFINION™ 2-instrumentet

- Starta instrumentet och ange eventuellt operatörs-ID.
- Analysera patientprover och kontroller i enlighet med testproceduren på omstående sida.
- En informationskod kan visas under analysen. Möjliga orsaker och åtgärder finns i användarmanualen till **AFINION** 2-instrumentet.



Informationskoder som är specifika för AFINION™ CRP-analysen:


Kod	Orsak
101	Hematokrit under 20 %
102	Hematokrit över 60 %




Läs användarinstruktionerna till AFINION™ för fullständig information:

- Bruksanvisningen till Afinion CRP.
- Bruksanvisningen till Afinion CRP Control.
- Användarmanualen till **AFINION** 2-instrumentet.


Testprocedur

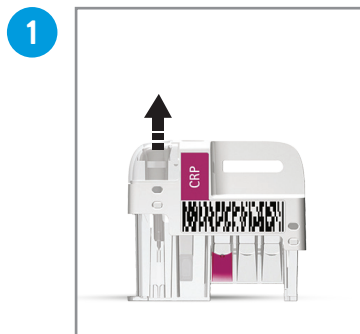

1 Dra provtagningsenheten rakt upp från testkassetten.

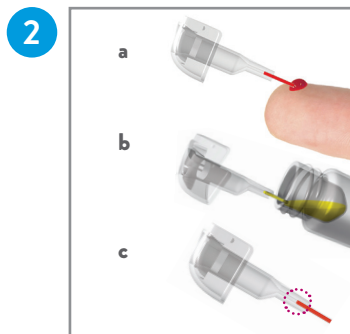

2 Fyll kapillärröret helt (c) med patientprov (a) eller kontroll (b). Torka inte av kapillärröret.

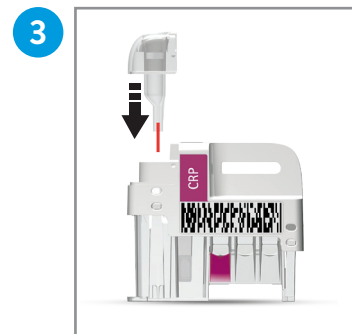

3 Sätt omedelbart tillbaka provtagningsenheten. Analysen av testkassetten måste startas inom 1 minut.



4 Tryck på  för patientprover eller på  för kontroller. Luckan öppnas automatiskt.



5 Sätt in testkassetten med streckkoden åt vänster.



6 Stäng luckan manuellt för att starta analysen.



7 Tryck på  och ange patient-ID, eller tryck på  och ange kontroll-ID. Tryck på  för att bekräfta.



8 Anteckna resultatet när det visas på skärmen. Tryck på  för att godkänna. Luckan öppnas automatiskt.



9 Ta omedelbart bort och kasta den använda testkassetten. Stäng luckan manuellt när instrumentet inte ska användas.