

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Organisation Region Värmland	Version 1
Dokumentägare Helen Jansson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2025-07-29	Giltig t.o.m. 2027-07-29

Rengöring av medicintekniska produkter (hjälpmedel)

Gäller för: Hälso- och sjukvård

För att förhindra indirekt kontaktsmitta, är rätt utförd rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter (till exempel hjälpmedel) viktigt.

Medicintekniska produkter ska tåla av sjukvården godkända rengöring- och desinfektionsprodukter. Vid oklarheter kontakta tillverkaren.

Vid upphandling av medicintekniska produkter ska rengöringsinstruktioner finnas tillgängliga från tillverkaren.

Exempel på medicintekniska produkter (till exempel hjälpmedel) som ska rengöras: säng, vändhjälpmedel i säng, bäcken, rullstol, rollator, gåbord och lyfthjälpmedel.

Exempel på annan medicinteknisk produkt som ska rengöras: blodtrycksmanschett.

Exempel på medicinteknisk elektronisk produkt som ska rengöras: BladderScan.

Rengöring och desinfektion

- Arbeta alltid utifrån basala hygienrutiner och använd skyddsutrustning såsom handskar, plastförkläde samt stänkskydd (visir) vid behov.
- Vid akutspill som vid till exempel synligt blod eller annan synlig smuts från kroppsvätskor torkas fläcken omgående upp med torr trasa och torka därefter med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid (Des +45). Vid misstänkt eller känd smitta – se rengöring nedan.
- Medicintekniska produkter som används till flera patienter ska desinfekteras efter varje tillfälle med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid (Des +45).
- Medicinteknisk elektronisk apparatur som används till flera patienter ska desinfekteras efter varje tillfälle med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid (Des +45).
- Medicintekniska produkter som kan tvättas i tvättmaskin, exempelvis lyftsele och överdrag till dynor, ska tvättas i minst 60 grader.
- Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60 grader eller en textil som är trasig och därmed inte går att desinfektera bör kasseras.
- Om patienten har en anpassad rullstol utprovad av arbetsterapeut ska den rengöras innan återlämning, se [INS-06557: Rullstol till patient med infektion – information till avdelning](#).

Rengöring och desinfektion vid misstänkt/ känd smitta

Clostridium difficile, calicivirus, MRSA och ESBL

Alla medicintekniska produkter av textil tvättas i 60 grader, går textilen inte att tvätta ska den kasseras. Rengör övriga ytor med Virkon. Medicinteknisk utrustning som inte tål Virkon avtorkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Medicinteknisk apparatur som inte tål Virkon avtorkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid (Des +45).

Skabb, covid-19, influensa och RS

Alla medicintekniska produkter av textil tvättas i 60 grader, går textilen inte att tvätta ska den kasseras. Rengör övriga ytor med fuktad mikrofiberduk, alternativt rengöringsmedel och vatten.

VRE

Alla medicintekniska produkter av textil tvättas i 60 grader, går textilen inte att tvätta ska den kasseras. Desinfektera övriga ytor med desinfektionsduk klor Wetwipe alternativt Actichlor Plus. Medicinteknisk utrustning som inte tål klor avtorkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Medicinteknisk apparatur som inte tål klor avtorkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid (Des +45).

Utarbetad av: Helen Jansson