

MPmlh+ Kort bruksanvisning

Tag bort sprutan innan drivmekanismen frikopplas.



Programmera sprutpumpen

Tryck & , och håll nere under 1 sekund för att sätta PÅ pumpen.

Tryck För att välja ett av de visade sprutmärkena.

Tryck För att välja en av de visade sprutvolymerna.

Tryck eller för att öka resp. minska flödes hastigheten.

Tryck och håll nere under 1 sekund tills CAL visas för att starta infusionen.

Avbryt infusionen- stäng AV pumpen: Tryck och håll nedtryckt under 3 sekunder.

Ändra flödes hastigheten under infusionen, ange ny hastighet och bekräfta inom 3 sekunder. Tryck tills CAL visas.

För detaljerad information hänvisas till Bruksanvisningen

Varningar

Pumpen är i vänteläge:
Siffror blinkar, starta infusionen

Låg batteriladdning

Nära slutet av infusionen.

Larm

Vid larm avbryts infusionen.

Stäng AV pumpen för att tysta larmet

Ocklusion alt. har kolven nått sin slutposition

Urladdat batteri:

Stäng AV pumpen och byt batterier

Tekniskt fel.

Anteckna felkoden. Stäng AV pumpen och sätt sedan PÅ den igen. Använd inte pumpen om larmet kvarstår.

Felplacering av spruta.

Kontrollera att sprutcylindrerflänsarna passar i pumpens skåror, att kolvens runda slutstycke passar i drivarmens springa, och att cylinderbältet sitter fast ordentligt.

Inget sprutmärke eller sprutvolym valdes

Micrel Medical Devices S.A., 42 Konstantinoupoleos Str, GR-19441 Koropi, Greece, Tel: (+30 210) 6032334, Fax: (+30 210) 6032335, Email: info@micrelmed.com, www.micrelmed.com

96286_ MPmlh+ (Multi Syringe)_Short Instructions For Use_sv_SE
Released Date: 2020-05-17. Revision 2